

Dräger DrugTest® 5000 Uređaj za indikaciju droga

Bez pipetiranja, bez kapanja, bez mjerenja vremena: Prikupljanje uzorka tekućine iz usta brzo je i jednostavno s uređajem Dräger DrugTest® 5000. Prikupljeni uzorak može se zatim odmah analizirati za točne rezultate na licu mjesta.



Prednosti

Uzimanje uzorka i analiza u jednom sustavu

Sustav za analizu droga Dräger DrugTest 5000 sastoji se od sustava za uzimanje uzorka testnog kompleta Dräger DrugTest 5000 i analizatora Dräger DrugTest 5000. Sadrži sve što vam je potrebno za prvu procjenu na licu mjesta.

Spremno za trenutačnu uporabu, ako je potrebno

Testni komplet Dräger DrugTest 5000 sadrži sustav za uzimanje uzorka spreman za uporabu. Želite provjeriti sumnjivu osobu? Samo uklonite poklopac i predajte testnu kazetu osobi koju želite testirati.

Higijenski i bezbolno: Prikupljanje bez uzimanja uzorka krvi

Osoba koja se testira kratko pomiče gornji dio skupljača naprijed-nazad po obrazu i desnim dok ugrađeni pokazatelj ne pokaže da je prikupljeno dovoljno uzorka. To obično traje manje od jedne minute i nikada više od četiri minute. Osoba koja se testira vraća vam kazetu tako da vi ne dolazite u dodir s uzorkom sline.

Plava boja znači da je uzimanje uzorka dovršeno

Dräger DrugTest 5000 automatski označava kraj procesa uzimanja uzorka: Ako je skupljač prikupio dovoljno sline, pokazatelj poprima plavu boju i proces uzimanja uzorka je gotov. Nakon toga se testna kazeta i patrona umeću izravno u analizator Dräger DrugTest 5000 radi analize.

Druge prednosti testnog kompleta Dräger DrugTest 5000:

- visoka razina sukladnosti s uzorcima krvi i granice otkrivanja važeće u Njemačkoj (potvrdilo Njemačko policijsko sveučilište ispitivanjem na terenu)
 - vrlo niska razina otkrivanja THC-a, glavnog aktivnog sastojka kanabisa
 - jasan prikaz rezultata
 - higijensko uzimanje uzorka i analiza
 - vrlo prihvatljivo za korisnika i testirane osobe
 - laka uporaba, čak i u zaštitnim rukavicama
 - dostupne različite konfiguracije (ovisno o modelu, istovremeno se može testirati nekoliko tvari)
 - može se koristiti pri temperaturi između 4 °C i 40 °C
 - može se pohraniti u originalnom pakiranju bez kvarenja do 30 °C
-

Trenutačna analiza uzoraka

Umetnite testnu kazetu i patronu, započnite analizu, gotovo:

Uzorak sline može se analizirati odmah nakon uzimanja uzorka. Samo umetnite testnu kazetu i patronu u analizator – analiza počinje odmah.

Jednostavna i sigurna uporaba – čak i u nepovoljnim uvjetima:

Prednosti

Čak i kada ste u gužvi: analizatorom upravljate pomoću samo tri tipke. Radom se upravlja iz izbornika. Samo slijedite tekstualne upute.

Brzo i ugodno – rezultati za samo nekoliko minuta:

Analiza se pokreće automatski nakon uključivanja uređaja. Na taj se način ne morate brinuti i imate slobodne ruke te možete pažnju obratiti na testiranu osobu. Rezultat će se prikazati nakon samo nekoliko minuta.

Čitljiv zaslon u boji:

Zaslon u boji je osvijetljen. To omogućuje kontrolu situacije čak i u uvjetima smanjene vidljivosti. Tekst na zaslonu možete pročitati bez problema, čak i na većoj udaljenosti ili iz kuta. Analizator Dräger DrugTest 5000 također jasno prikazuje rezultate mjerenja. Zbog toga ne može doći do krivih očitavanja.

Analiza uzoraka kad god je to potrebno:

Bez obzira upotrebljavate li sustav za uzimanje uzoraka s napajanjem od 230 V ili uključeni prilagodnik za automobil od 12 V, integrirana punjiva baterija pruža vam neovisnost od vanjskih izvora energije, a analizator je spreman za uporabu bilo kada i bilo gdje.

Pohrana 500 rezultata mjerenja i jednostavno upravljanje:

Pohranjuje posljednjih 500 rezultata mjerenja s datumom i vremenom. Daljnje detalje o mjerenju možete unijeti putem tipkovnice ili čitača barkoda. Rezultate možete ispisivati mobilnim pisačem Dräger na licu mjesta. Kako biste ih zabilježili, podatke možete prenijeti na računalo putem USB-a.

4,5 kg laganih za prijenos:

Analizator je lagan za nošenje. Za lak i siguran prijenos uređaja i dodatnog pribora Dräger nudi pripadajuću torbu za nošenje ili robustnu kutiju.

Druge prednosti analizatora Dräger DrugTest 5000

- integrirana funkcija autotestiranja: nije potrebna polugodišnja kalibracija
- mnoštvo dodatnog pribora (npr. torba, punjač baterije ili kompaktna tipkovnica)

Sustav otkriva brojne tvari, primjerice:

- Amfetamine
- Benzodiazepine
- Delta-9-tetrahidrokanabinol (THC)
- Kokain
- Metamfetamine
- Opijate
- Metadon
- Ketamin

Prednosti

Dräger SSK 5000: Otkriva droge na površinama ili u drugim tvarima

Želite odmah saznati mogu li se na upravljaču otkriti tragovi droge ili sadrži li sumnjiva torba drogu? Jednostavno odgovorite na takva pitanja uzimanjem uzorka pomoću skupljača uzoraka Dräger SSK 5000 i prijenosom uzetog uzorka u testni komplet Dräger DrugTest 5000. Uzorak zatim možete analizirati pomoću analizatora Dräger DrugTest 5000.

Pribor



D-4814-2014

Testni kompleti

Ergonomski dizajniran za lako rukovanje i trenutačno spreman za uporabu, ovaj inovativni testni komplet sastoji se od jednog glavnog dijela – testne kazete s ugrađenim skupljačem tekućine iz usta.



ST-3451-2003

Kompaktne tipkovnice

- sa sučeljem PS2, dimenzija približno 28,2 x 13,2 x 2,4 cm.
- „QWERTZ” - njemački raspored, REF: 8315095
- „QWERTY” - engleski raspored, REF: 8315497
- „AZERTY” - francuski raspored, REF: 8315142

Pribor

ST-8404-2006



Mobilni pisač Dräger

Mobilni pisač Dräger ispisuje rezultate mjerenja alkohola i droge u dahu bez uporabe pripadajućeg napajanja energijom. Napaja se pomoću 4 AA baterije.

REF: 8319310

D-52608-2012



Kutija za prijenos za Dräger DrugTest 5000

REF: 8322675

D-4337-2014



Tvrda kutija za prijenos

REF: 8319925

D-12909-2009



Čitač barkoda

REF: AG02491

Povezani proizvodi



ST-13226-2007

Dräger DCD 5000

Jednostavno, brzo i sigurno otkrivanje intoksikanata i droga: Dräger DCD 5000 omogućuje jednostavno prikupljanje sline te pruža mogućnost pohranjivanja uzoraka i njihovo slanje u laboratorij radi analize – bez mogućnosti krivotvorenja uzorka u međuvremenu.



D-74696-2013

Dräger Alcotest® 6820

Čuvanje cesta sigurnima i slobodnima od vozača pod utjecajem nepredvidiv je i vrlo stresan posao. Dräger je osmislio ručni analizator daha Alcotest® 6820 posebno za potrebe službenika za provedbu zakona. Jednostavno se upotrebljava i daje brze, pouzdane rezultate u najzahtjevnijim situacijama u kojima se možete naći, kada je svaka sekunda važna.



ST-15093-2008

Dräger Alcotest® 7510

Ovaj kompaktan i robustan ručni uređaj za mjerenje alkohola u dahu posebno je osmišljen za napredna testiranja. Savršen je za uporabu od strane policije, u komercijalnim i industrijskim djelatnostima kao uređaj za alkotestiranje. Alcotest® 7510 u mnogim se državama i na mnogim tržištima može koristiti kao "Klizni i klikni"

Tehnički podaci

Radni napon	12 V izravni napon (iz isporučenog sklopa napajanja)
Unos snage	obično 3 A
Dimenzije (D × V × Š)	200 × 260 × 250 mm
Težina	4,5 kg
Radni raspon	Rad: 4 °C do 40 °C Pohrana / prijevoz: -20 °C do +60 °C relativna vlažnost 5 do 95 % (bez kondenzacije)
Ulazi	optički za pisač, PS/2, USB Slave
Vrijeme mjerenja	ovisno o upotrijebljenom testnom kompletu (obično < 9 minuta) opcijski: Analiza za < 5 minuta povećanjem eliminacije THC-a na 25 ng/ml (nakon ažuriranja softvera uređaja)
Kapacitet pohrane	500 bilješki ili mjerenja

Informacije za naručivanje

	Pakiranje	Br. za naručivanje
Dräger DrugTest® 5000 Analizator	1 analizator sa sklopom napajanja	83 19 900
Dräger DrugTest® 5000 Testni komplet COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MAMP*	20 komada	83 19 830
Dräger DrugTest® 5000 Testni komplet COC-OPI-THC-AMP-MAMP*	20 komada	83 21 280
Dräger DrugTest® 5000 Testni komplet COC-OPI*	20 komada	83 19 990
Dräger DrugTest® 5000 Testni komplet COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MAMP-MTD*	20 komada	83 23 156
Dräger DrugTest® 5000 Testni komplet COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MAMP-MTD- KET*	20 komada	83 23 646**
Dräger SSK 5000	20 komada	83 20 490
Kompaktna tipkovnica, njemački raspored („QWERTZ“)	1	83 15 095
Kompaktna tipkovnica, engleski raspored („QWERTY“)	1	83 15 497
Kompaktna tipkovnica, francuski raspored („AZERTY“)	1	83 15 142
Čitač barkoda	1	AG 02 491
Mobilni pisač Dräger	1	83 19 310
Kutija za prijenos za analizator DrugTest® 5000 i dodatni pribor	1	83 22 675
Tvrda kutija za prijenos za analizator DrugTest® 5000	1	83 19 925

* COC: kokain – *OPI: opijati – *BENZO: benzodiazepini – *THC: kanabis – *AMP: amfetamin – *MAMP: metamfetamini – *MTD: metadon – *KET: ketamin

** Prodaje se isključivo u Europskoj uniji

Napomene

GLAVNO SJEDIŠTE UPRAVE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Njemačka
www.draeger.com

ZA HRVATSKU
Dräger Medical Croatia d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
100 10 Zagreb
Tel +385 1 65 99 444
Fax +385 1 65 99 403
prodaja.mt@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Beč, Austrija
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

